


# MEDICAL SPEED PRO

 Medical Technology

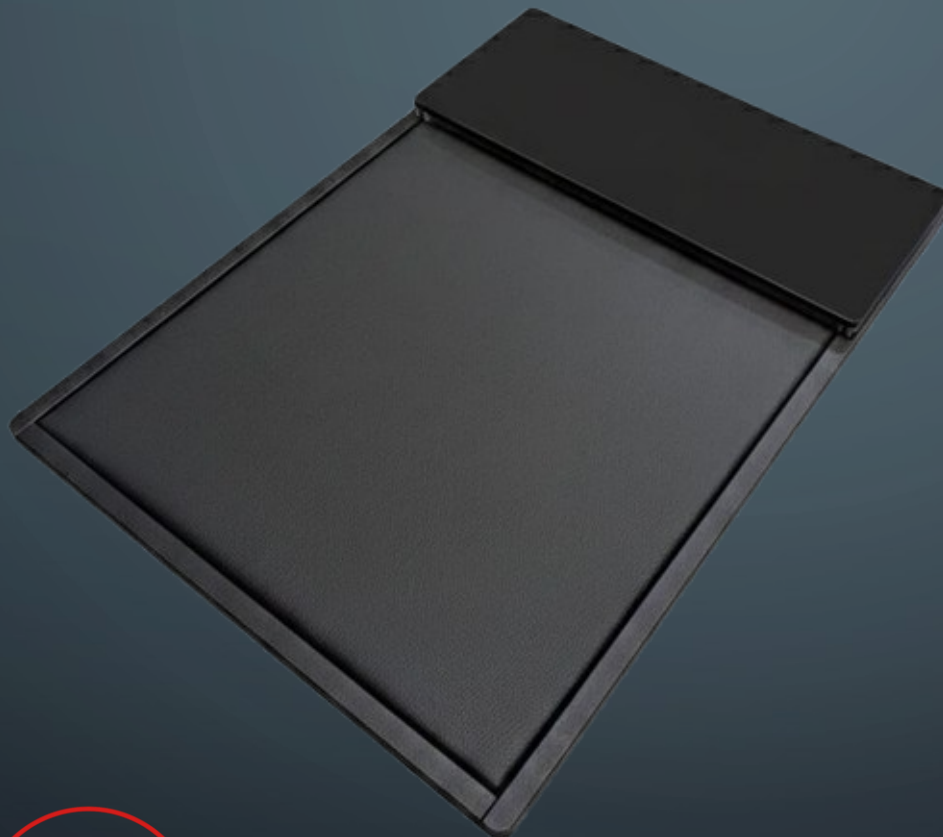

**Medical Technology s.r.l.**

Via Gargano 34, 000141 Roma

P.Iva 17458581000

[www.medicaltechnologysrl.com](http://www.medicaltechnologysrl.com)

| COMPUTER REQUISITI MINIMI CONSIGLIATI |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| PROCESSORE                            | INTEL CORE I5                |
| RAM                                   | 8GB                          |
| HARD DISK                             | 1TB                          |
| SCHEDA VIDEO                          | DEDICATA NVIDIA              |
| RISOLUZIONE VIDEO                     | 1920 X 1080                  |
| SISTEMA OPERATIVO                     | WINDOWS 10/11 PRO<br>64Bit   |
| SCHEDA TECNICA                        |                              |
| Sensore resistivo                     | 16 sensori x Cm <sup>2</sup> |
| Alimentazione                         | 15 Vcc                       |
| Assorbimento (mA)                     | 50                           |
| Risoluzione XY                        | 1,5 DPI                      |
| Risoluzione Z                         | 8 Bit                        |
| Materiale                             | Alluminio                    |
| Frequenza di acquisizione             | 5/600 Hz selezionabile       |
| Tipo di interfaccia                   | USB 2.0                      |
| Dimensione in mm                      | 400 x 550                    |
| Peso Kg                               | 4 Kg                         |
| Spessore lato sensori                 | 12 mm                        |
| Durata dei sensori                    | 1.000.000 di cicli           |
| Calibrazione                          | 10 Bit Automatica            |
| Pressione massima                     | 150N/Cm <sup>2</sup>         |
| Temperatura di lavoro                 | 0°C – 55°C                   |
| Certificazione del prodotto           | CE                           |

# MEDICAL SPEED PRO

Cosa contiene il pacco

- Una Pedana Speed Pro
- Un Trasformatore 220/15v
- Due camminamenti passivi misura 60x40 cm cadauno.
- Un cavo usb 2.0 con doppia ferrite antidisturbo.
- Una borsa morbida per il trasporto.
- Una Licenza software inclusa.

# MEDICAL SPEED PRO

## Procedura di collegamento

- Posizionare a terra la Pedana, ricordiamo che lo strumento ha un verso di acquisizione, il paziente salendo sopra dovrà avere i connettori di alimentazione alla sua sinistra.
- Posizionare i due camminamenti passivi uno in entrata e uno in uscita della pedana.
- Con l'interruttore di corrente spento, collegare i cavi di alimentazione e il cavo usb 2.0 prima alla pedana e successivamente al computer.
- Se si tratta della prima installazione, Contattare il servizio tecnico per procedere con l'installazione del programma e il rilascio della licenza d'uso.
- Se il programma è già installato nel computer accendere il tasto di accensione sul lato sinistro della pedana, ricordiamo di attendere almeno 8 secondi, durante questo tempo la luce rossa emetterà dei lampeggii, se al termine degli 8 secondi la luce rossa continua a lampeggiare vuol dire che lo strumento ha controllato tutta la parte elettronica e tutto è stato diagnosticato perfettamente funzionante, qualora dopo gli 8 secondi la luce rimanga fissa o spenta, è sintomo di un danneggiamento della parte elettronica.